

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-VITAMINE»,  
«MULTIWAVE-NATURE», «MULTIWAVE-TAURINE», «MULTIWAVE-HERBAL»  
ТУ ВУ 192002495.005-2015 . РУ МЗ РБ ИМ-7.116828.

---

### Наименование:

Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-VITAMINE», «MULTIWAVE-NATURE», «MULTIWAVE-TAURINE», «MULTIWAVE-HERBAL». **Описание:** представляют собой прозрачные бесцветные жидкости, при встряхивании наблюдается незначительное пенообразование.

### Состав «Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-VITAMINE»»:

вода очищенная; натрий хлористый; гидроксипропилметилцеллюлоза; кислота борная; натрий тетраборнокислый 10-водный; полиэтиленгликоль; динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты; гиалуронат натрия; феруловая кислота; полисорбат-80; ретинола ацетат /пальмитат (витамин А); альфа-токоферола ацетат (витамин Е); полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид.

### Состав «Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-NATURE»»:

вода очищенная; экстракт (гидролат) василька водный; экстракт (гидролат) алоэ водный; экстракт (гидролат) лопуха анисового водный; натрий хлористый; гидроксипропилметилцеллюлоза; кислота борная; натрий тетраборнокислый 10-водный; полиэтиленгликоль; динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты; гиалуронат натрия; феруловая кислота; полисорбат-80; полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид.

### Состав «Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-TAURINE»»:

вода очищенная; натрий хлористый; таурин; гидроксипропилметилцеллюлоза; кислота борная; натрий тетраборнокислый 10-водный; полиэтиленгликоль; динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты; гиалуронат натрия; полисорбат-80; полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид.

### Состав «Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-HERBAL»»:

вода очищенная; экстракт (гидролат) очанки (глазницы аптечной) водный; экстракт (гидролат) чабреца (тимьяна) водный; натрий хлористый; гидроксипропилметилцеллюлоза; кислота борная; натрий тетраборнокислый 10-водный; полиэтиленгликоль; динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты; гиалуронат натрия; полисорбат-80; декспантенол (провитамин В 5); полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид.

### Фармакологические свойства:

Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-VITAMINE», «MULTIWAVE-NATURE», «MULTIWAVE-TAURINE», «MULTIWAVE-HERBAL» представляют собой изотонические растворы в боратном буфере с различными добавками (влагоудерживающими, бактерицидными, антиоксидантными, биологически активными веществами из экстрактов растений и др.).

Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-VITAMINE», «MULTIWAVE-NATURE», «MULTIWAVE-TAURINE», «MULTIWAVE-HERBAL» улучшают движение слезной жидкости по сосудистому руслу. Оказывают профилактическое действие на процесс васкуляризации склеры и улучшают обменные процессы в склере.

### Показания к применению:

Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-VITAMINE», «MULTIWAVE-NATURE», «MULTIWAVE-TAURINE», «MULTIWAVE-HERBAL» предназначены для обеспечения комфорта при ношении контактных линз (снятия напряжения глазных

мышц, неприятных ощущений, сухости глаз), восстановления слезной пленки, питания витаминами глаз, для длительно работающих за компьютерами, после длительных зрительных нагрузок, для водителей, для улучшения всасывания лекарственных капель.

**Способ применения:**

Закапать 2-3 капельки капель универсальных офтальмологических «MULTIWAVE-VITAMINE», «MULTIWAVE-NATURE», «MULTIWAVE-TAURINE», «MULTIWAVE-HERBAL» в уголок каждого глаза и поморгать до полного комфортного ощущения.

**Рекомендации по использованию с контактными линзами:**

Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-VITAMINE», «MULTIWAVE-NATURE», «MULTIWAVE-TAURINE», «MULTIWAVE-HERBAL» рекомендованы для продления ношения контактных линз. Использовать по инструкции во время одевания контактных линз и во время их эксплуатационного периода в течение дня.

**Побочные эффекты:** не выявлены.

**Противопоказания:** повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам капель универсальных офтальмологических «MULTIWAVE-VITAMINE», «MULTIWAVE-NATURE», «MULTIWAVE-TAURINE», «MULTIWAVE-HERBAL».

**Указания по применению:** Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-VITAMINE», «MULTIWAVE-NATURE», «MULTIWAVE-TAURINE», «MULTIWAVE-HERBAL» могут применяться беременными женщинами, женщинами в период грудного вскармливания.

**Указания влияния на способность управлять транспортными средствами:**

Капли универсальные офтальмологические «MULTIWAVE-VITAMINE», «MULTIWAVE-NATURE», «MULTIWAVE-TAURINE», «MULTIWAVE-HERBAL» не влияют на управление транспортными средствами.

**Форма выпуска и упаковка:**

Капли выпускаются в полимерных флаконах по 10, 15, 25 мл с капельницей и крышкой с контролем первого вскрытия в картонной упаковке.

**Стерильность**

Капли являются стерильными.

**Условия отпуска:** Без рецепта врача.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 24 (двадцать четыре) месяца с даты изготовления.

**Срок эксплуатации:** После вскрытия флакона содержимое использовать в течение двух месяцев. Не хранить флакон с каплями открытым. После вскрытия флакона капли хранить в холодильнике.

**Гарантии производителя:** производитель гарантирует соответствие капель требованиям ТУ BY 192002495.005-2015 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

**Утилизация капель с истекшим сроком годности:** капли с истекшим сроком годности утилизируются путем разбавления водопроводной водой в десятикратном размере и сливании в общую канализационную систему. Класс отходов 4.

**Изготовитель:** ООО «Чистая река», Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корп. 8, офис 118  
т/ф: +375(17) 346-86-36.

e-mail: [info@c-river.by](mailto:info@c-river.by). Сайт: [www.mutiwave.by](http://www.mutiwave.by)

**Внимание! Капли можно применять прямо на линзу в глазу**

---